


STYLO CALCANEUS

FIJADOR EXTERNO PARA CALCANEOS

Versatil y modular

Rotula articular

Esteril

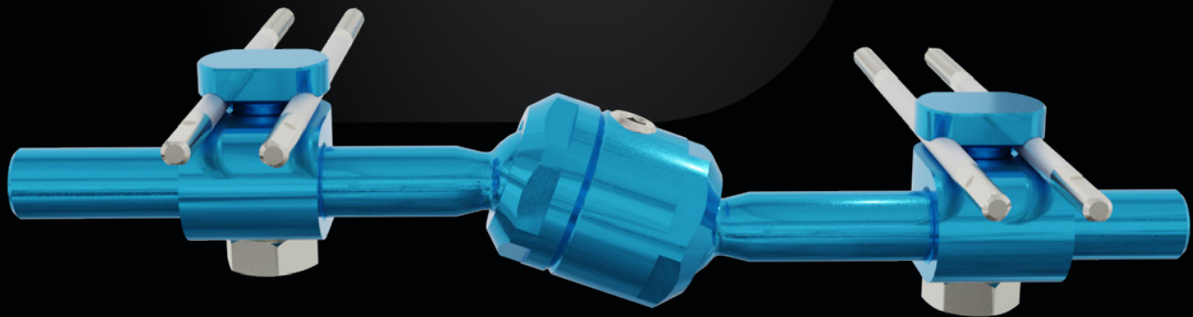

Introducción

El tratamiento de las fracturas de calcáneo a menudo se considera un desafío para el cirujano, ya que involucra cuestiones críticas relacionadas con la anatomía y la biomecánica.

En las fracturas tipo II, III y IV de la clasificación de Sanders, se piensa que el tratamiento quirúrgico con placas y tornillos puede dar mejores resultados que el tratamiento conservador. Sin embargo, la literatura muestra que no existe una ventaja real de un método sobre el otro.

La fijación interna a menudo resulta en mejores reducciones, pero con altas complicaciones postoperatorias, mientras que el tratamiento conservador implica menos sangrado pero puede plantear problemas en términos de lograr reducciones satisfactorias.

La cirugía mínimamente invasiva, combinada con una nueva generación de fijadores dedicados a las fracturas de calcáneo, asegura mejores resultados funcionales, gracias a una menor exposición quirúrgica, tiempos reducidos de cirugía y hospitalización, y menos complicaciones.

La confianza en los fijadores de calcáneo modernos permite la reducción percutánea y una buena estabilidad de la fijación, lo que reduce significativamente el riesgo de complicaciones.

Indicaciones

Fracturas articulares compuestas del calcáneo tipo I, II, III y IV según la clasificación de Sanders, y fracturas asociadas a daño severo de partes blandas.

CARACTERÍSTICAS

Kit desechable estéril

Modular

Universal

Fabricado en aleación de aluminio y acero inoxidable

VENTAJAS


Listo para usar

Equipado con accesorios para diferentes aplicaciones

Derecho/Izquierdo

Ligero

Kit Stylo para Calcáneo

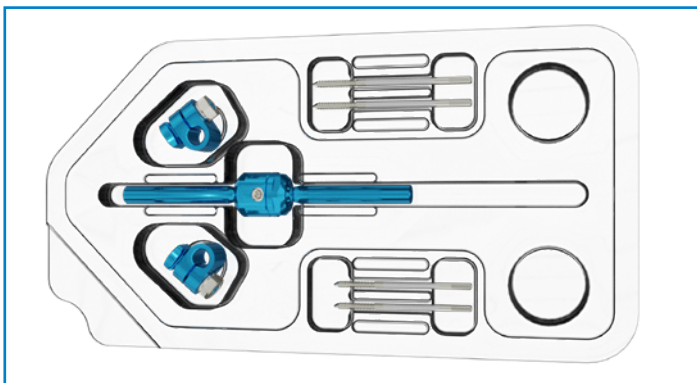

Descripcion

Cant.

Cuerpo de fijador Corto

1


Cabezal

2

Tornillo de Ø 3.0 mm, L 70 mm

4

Componentes

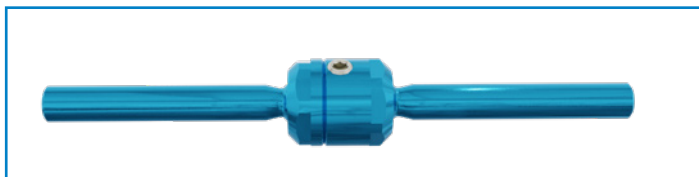

Cuerpo de fijador Corto

La rotula facilita la reduccion y permite la correccion en cualquier plano.




Abrazadera de doble tornillo

Permite aplicar un par de tornillos paralelos. Apretar la tuerca permite bloquear los tornillos en la abrazadera y la abrazadera en el cuerpo.

Para una mejor fijacion y estabilidad de la fractura, se pueden conectar tornillos adicionales y/o alambres de Kirschner de (1.5 mm 3.0 mm) al cuerpo del fijador mediante accesorios. Las abrazaderas se pueden girar para optimizar el posicionamiento de los elementos de agarre.

Accesorios

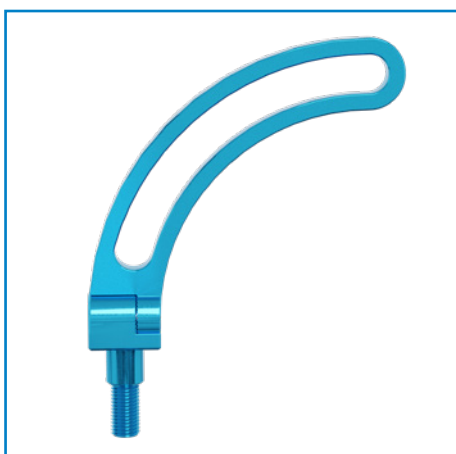

Arco 120 mm Ø 90° 5002016ST

Permite elementos de agarre oseo adicionales (agujas de Kirschner y/o tornillos) en diferentes planos, proporcionando una mejor estabilidad.




Barra riel 5002015ST

Permite elementos adicionales de agarre oseo (Agujas Kirschner y/o tornillos) en diferentes planos, lo que brinda una mejor estabilidad.



Abrazadera simple de extremo abierto 5002010AST

Permite la conexión del arco o barra de riel al cuerpo del fijador y/o la fijación de un elemento adicional, directamente sobre el cuerpo del fijador.

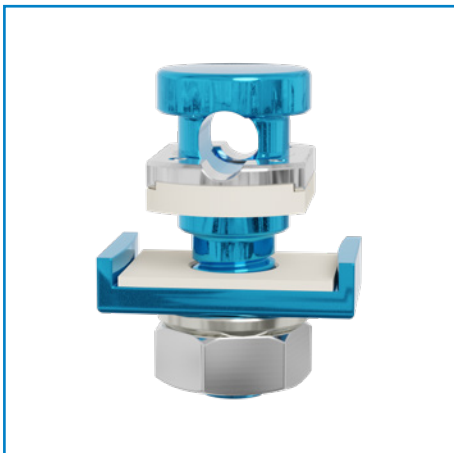

Abrazadera de un solo Arco 5000004ST

Permite fijar elementos de agarre adicionales al arco o a la barra.



Abrazadera simple 5002010ST

Permite fijar un elemento de agarre adicional al cuerpo del fijador.




Abrazadera en T 5002011ST


Permite aplicar un par de tornillos paralelos en un plano perpendicular al plano del cuerpo del fijador.

Configuraciones de implantes


Gracias a las características de modularidad y versatilidad del fijador, son posibles varios tipos de implantes para cumplir con los requisitos quirúrgicos y anatómicos en la mayor medida posible.

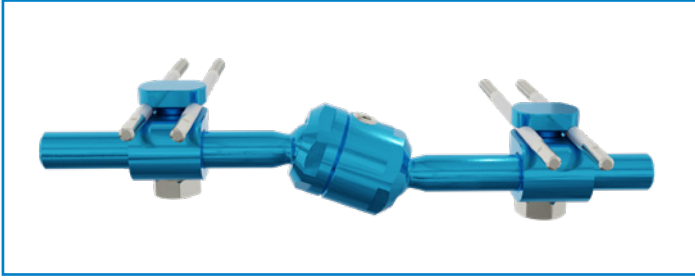

IMPLANTE BASE

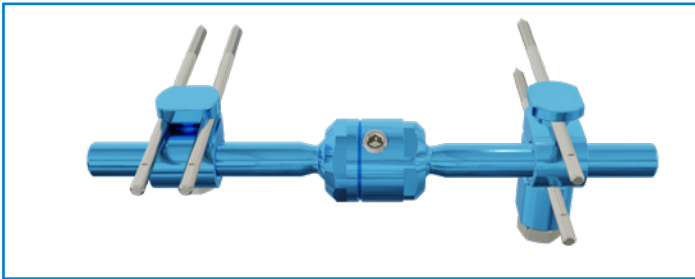

IMPLANTE CON ABRAZADERA EN T

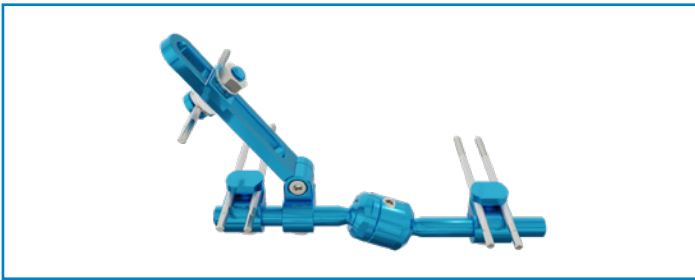

IMPLANTE MULTIPLANAR CON BARRA RIEL



IMPLANTE MULTI-PLANAR CON ARCO

Estas son algunas de las posibles configuraciones de implantes.

Esterilización

El kit Stylo para Calcaneo se suministra Esteril.

Se recomienda esterilizar el instrumental en autoclave de vapor saturado de la siguiente manera:

TEMPERATURA: 134°

EXPOSICION: 10 min

5002002CST KIT STYLO PARA CALCANEOS

COMPONENTES Y ACCESORIOS

Codigo	Descripcion
5002007ST	Extension de 40 mm
5002010ST	Abrazadera simple Stylo
5002010AST	Abrazadera simple de extremo abierto Stylo
5002011ST	Abrazadera doble extendida Stylo
5002012ST	Abrazadera doble Stylo
5002016ST	Arco de 90° Ø120 mm
5002016CST	Arco de 90° Ø120 mm completo con abrazadera de tornillo
5002015ST	Conector de riel Stylo
5000004ST	Abrazadera simple para arco
5002401ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 60 mm, rosca 20 mm
5002402ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 70 mm, rosca 20 mm
5002403ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 80 mm, rosca 20 mm
5002404ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 90 mm, rosca 20 mm
5002411ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 50 mm, rosca Ø 2.5 L 12 mm
5002412ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 60 mm, rosca Ø 2.5 L 12 mm
5002413ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 70 mm, rosca Ø 2.5 L 12 mm
5002414ST	Tornillo cortical autoperforante, vástago de Ø 3.0 mm L 80 mm, rosca Ø 2.5 L 12 mm
5002431ST	Alambre roscado Ø 1.5 mm L 100mm, rosca 40 mm Este alambre puede ser usado con las abrazaderas 5002010ST, 5002010AST, 5002011ST y 50000004ST

INSTRUMENTAL *

Codigo	Descripcion	Cant.
5006562STY	Set completo de instrumentos para esterilizar Stylo	
Composta da:		
5002070	Canula doble	1
5002056	Extension de tornillo	1
5000214	Llave en T de 10 mm	1
5000623	Llave plana de 10 mm	1
5000625	Llave hexagonal y Llave con mango en T para tornillos 3.0-5.0 mm	1
5002024	Unidad de compresion y distraccion (Opcional)	1
5006560STY	Bandeja para esterilizar instrumentos Clickit Stylo (vacía)	1

* Los dispositivos implantables y esteriles estan cubiertos por la marca CE-1936, mientras que los instrumentos reutilizables no esteriles estan cubiertos por la marca CE.



SEDE LEGAL

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUCCIÓN

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it